



El O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup> es un juego de instrumentos particularmente concebidos para quitar garrapatas parasitarias de la piel de animales y de la gente.

- Quita todas garrapatas, de cualquier tamaño (desde 1/10 de milímetro) y de cualquier emplazamiento.
- No deja partes de la boca de la garrapata en la piel si es utilizado correctamente.
- No comprime el abdomen de la garrapata, por lo que reduce el riesgo de la transmisión de agentes patógenos (la enfermedad de Lyme, Encefalitis).
- No necesita productos químicos (alcohol, éter).
- Permite una rápida, fácil e indolora remoción de garrapatas.
- Es irrompible, resistente e indefinidamente reutilizable.

## ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE DE QUITAR A LAS GARRAPATAS?



Las garrapatas son parásitos que se alimentan de la sangre de personas o animales. Al absorber sangre, las garrapatas pueden transmitir enfermedades peligrosas, ya que algunas ellas transportan agentes patógenos.

Desgraciadamente, la cantidad de garrapatas infectadas se incrementó sustancialmente estos últimos años.


**Para reducir el riesgo de contagio de una enfermedad, las garrapatas deberían ser removidas tan rápidamente como sea posible, sin romper partes de la boca, sin apretar el cuerpo de la garrapata y sin matarla de antemano.**

Las mordeduras de las garrapatas pueden ser limitadas utilizando productos químicos pero éstos no pueden asegurar una protección completa, por lo que cada persona (propietarios de animales) debería tener un instrumento eficaz para remover las garrapatas.

## ¿POR QUÉ EL O'TOM<sup>®</sup> / TICK TWISTER<sup>®</sup>?

Es esencial no comprimir el cuerpo de la garrapata durante la remoción, reduciendo el riesgo del reflujo de saliva, que puede traer infecciones y/o alergias. Pinzas y otros instrumentos ejercen presión sobre la garrapata. La forma del O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup>, diseñado por un veterinario, toma en consideración la morfología de la garrapata.

La parte de la boca de la garrapata es cubierta con proyecciones enviadas hacia atrás; esto permite a la garrapata « anclarse » en la piel. Empujando hacia arriba sobre la garrapata, las puntas subirán y cerrarán la partes de la boca en la piel. La garrapata puede quebrarse y dejar partes en la piel causando la infección.

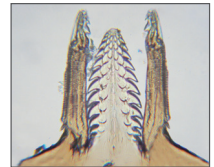

Por un movimiento de retorcimiento; las puntas se pliegan en el eje de rotación y la garrapata es fácilmente quitada, sin tracción, disminuyendo los riesgos de romper el rostrum.


El O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup> quita la garrapata por rotación y no por fuerza; entre todos los supuestos instrumentos que utilizan la rotación, es el más fácil utilizar a causa de su forma y su tamaño.



**El O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup> es el único instrumento que permite al usuario tomar la garrapata sin comprimirla y quitarla por retorcimiento antes que por la fuerza.**

**Esta técnica es el mejor y es el modo más seguro de remover completamente las garrapatas.**

### MÉTODO DE UTILIZACIÓN

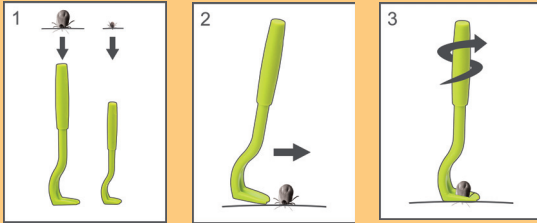

1. Escoja el gancho más apropiado, según el tamaño de la garrapata.
2. Utilice el gancho acercando la garrapata por el costado hasta que la sostenga.
3. Levante el gancho muy ligeramente y RETUERZA hasta que la garrapata se separe sola.

### BREVETS ET MARQUES DEPOSEES

El O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup> son instrumentos protegidos por patentes internacionales que incluyen Europa, USA, Canadá y otros países: EP 0 821 571, USP 5.876.409.

Dependiendo de países y campos de distribución, el producto es vendido bajo el nombre O'TOM<sup>®</sup> o Tick Twister<sup>®</sup>. Los dos O'TOM<sup>®</sup> y Tick Twister<sup>®</sup> son marcas registradas que pertenecen a H3D.



### ¿DE QUÉ ESTA HECHO?

El O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup> está hecho de Polyacetal. Escogimos este polímero porque:

- es robusto;
- es resistente al alcohol, al éter, a solventes y a otras sustancias que pueden haberse utilizado sobre garrapatas con anterioridad;
- no es tóxico, es totalmente reciclable y puede ser incinerado sin emitir vapores de cloruro.

### ¿Quién TIENE CONFIANZA EN EL O'TOM<sup>®</sup> / TICK TWISTER<sup>®</sup>?

#### “ VETERINARY RECORD “ del Reino Unido

Según una investigación publicada en el Veterinary Record, el O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup> ha sido elegido y recomendado por los dos autores (especialistas en parasitología) y por los veterinarios que participaron en el estudio.

#### “TIER BILD ZEITUNG” de Alemania

El O'TOM<sup>®</sup> ganó una prueba comparativa organizada por esta revista.

#### ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

BADA (Borreliosis and Associated Diseases Awareness) del Reino Unido recomienda O'TOM<sup>®</sup> / Tick Twister<sup>®</sup>.

#### USUARIOS

Millones de usuarios lo utilizan. No pueden estar equivocados.

*“Es súper. ¡ Muy fácil de usar!”* - B.E., Groomer, Reino Unido.

*“Estoy muy satisfecho con el gancho OTOM. Hace un trabajo muy bueno y facilita la remoción de las garrapatas mucho más fácil. ¡Sólo espero no tener que utilizarlo demasiado! El instrumento es asombrosamente fácil de utilizar. ¡Jamás utilizaré pinzas pequeñas de nuevo!”* - B.G., Nurse, Estados Unidos.

*“Mejor que otros métodos.”* - B.D., Care giver, Escocia.

*“ Pienso que es muy útil en la remoción completa de las garrapatas sin manipular la garrapata directamente, reduciendo así el riesgo de la transmisión de enfermedad.”* - T.F., Veterinarian, Estados Unidos.

*“Muy fácil de usar - El mejor instrumento contra las garrapatas que utilicé hasta ahora.”* - J.C., Pet Owner, Reino Unido.

*“Las garrapatas salen muy fácil. ¡ Un pequeño súper gadget!”* - D.W., Hiker, Irlanda.

